


## Aspirateur de mucosités ATMOS A 161 Battery / C 161 Battery



### VERSION DDS

TOUJOURS avoir un filtre anti-bactérien DDS de réserve : l'appareil ne doit pas être utilisé sans filtre !

Installer l'appareil sur une surface plane et stable.

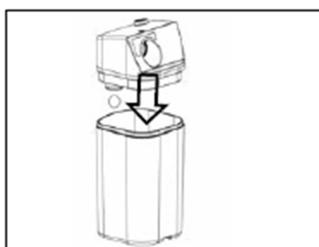

Positionner le couvercle DDS sur le bocal et appuyer à deux mains.




Pour mettre en place l'ensemble bocal + couvercle, pousser à l'horizontale, filtre fixé sur l'appareil.




Pour retirer le bocal, il est possible d'utiliser un instrument levier (spatule plate par exemple)

La tubulure d'aspiration se connecte sur l'embout biconique placé sur le couvercle du bocal.


### VERSION MEDI-VAC

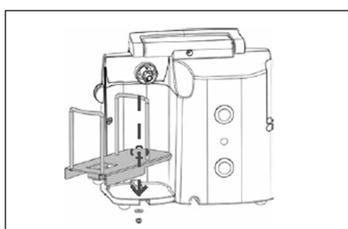

Fixer le support en le vissant à l'appareil

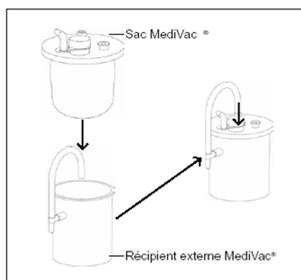

Insérer la poche dans le bocal et bien fermer le couvercle sur le bocal

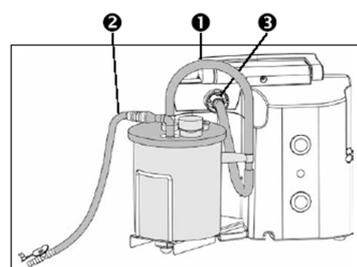


Connexion de la tubulure :

- 1 Tubulure d'aspiration
- 2 Canal d'aspiration
- 3 Connexion pour tuyau d'aspiration


### VERSION SERRES



Fixer le support en le vissant à l'appareil

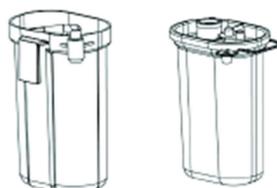


Insérer la poche dans le bocal et bien fermer le couvercle sur le bocal

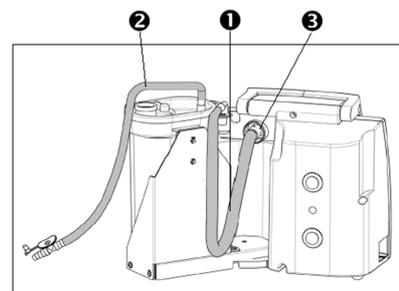


Connexion de la tubulure :

- 1 Tubulure d'aspiration
- 2 Canal d'aspiration
- 3 Connexion pour tuyau d'aspiration

## Chargement de la batterie

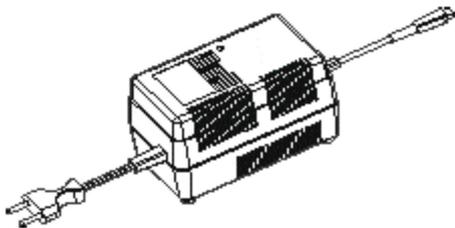


La batterie se charge avec le chargeur 12 V fourni. Connecter le câble du chargeur à la prise de l'appareil. Connecter la prise du chargeur à la prise secteur.

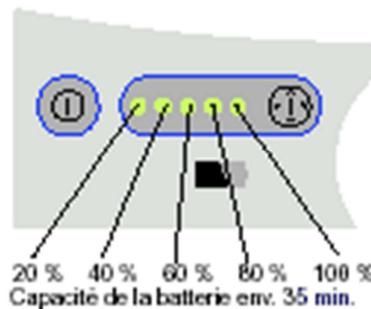

Affichage de l'état de charge de la batterie.

## Mise en place du cathéter d'aspiration

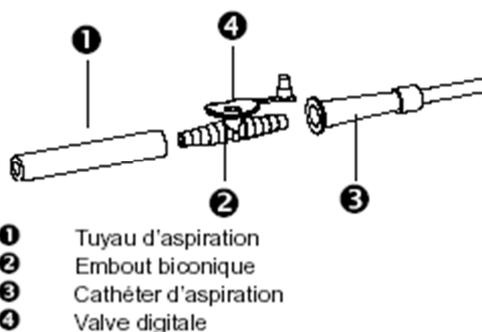

### ATTENTION :

Ouverture de la valve = interruption de l'aspiration

Boucher la valve avec le doigt = aspiration

## Réglage de la dépression

### A 161 Battery



Positionner le bouton sur le niveau souhaité :  
Low = -25 kPa  
Middle = -55 kPa  
High = -75 kPa

### C 161 Battery



Boucher le tuyau d'aspiration afin de laisser le vide se faire, puis régler le régleur de la dépression jusqu'à affichage du vacuum désiré.