




# Comment remplir une bouteille d'IFiLL

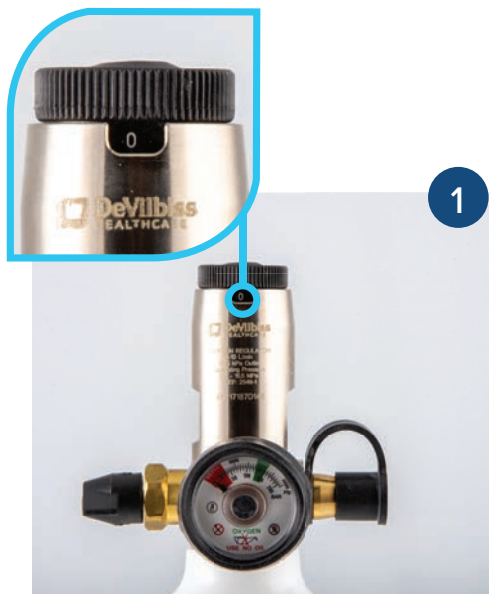

1  
Mettre le débitmètre à 0.  
Laisser la vanne d'arrêt sur ON.



2  
Retirer la protection  
du coupleur.



3  
Noter l'heure de début  
de remplissage au feutre effaçable.



4  
Refermer la protection  
du coupleur.

**Nb : la fuite d'O<sub>2</sub> lors de la fermeture de la vanne d'arrêt est normale et peut durer jusqu'à 1 minute. Elle correspond à la quantité d'O<sub>2</sub> contenue entre la vanne d'arrêt et la sortie patient. NE PAS FORCER sur la vanne d'arrêt.**